

# コルセット装着方法について



- マジックテープがついている方が体の**前面**になります。
- ヒモがついている方が体の**後面**、**結び目が上側**になります。
- 装着の際は必ず**肌着**等を着て、素肌に直接は装着しないでください。
- マジックテープの締め方は、**ウエスト近くのマジックテープ**から締めると着けやすいです。
- 高さの位置は、座った時に**コルセットの下縁が足の付け根**にふれるくらいになります。
- きつく締める必要はないですが、**適度に締める**ことで腰を安定させます。
- 食事の時などは、胃の辺りのマジックテープを緩めて調節してください。
- 洗濯は手洗いしてタオルで水分をふきとり、日陰干ししてください。

ご不明な点がございましたら弊社までご連絡ください。

(株)ワンアップブレース  
〒181-0015 三鷹市大沢6-7-18  
TEL : 0422-30-1204